


銀イオン空涼マスク 接客・商談に!

本品は純銀フィルターが縫い込まれているマスクです。洗濯が50回以上可能で、100～150回以上使用可能! マスクが持っている欠点【息苦しい・声がこもる・不潔・臭う・暑い】に対応した画期的なマスクです。※特許取得済

【飛沫防止、除菌・消臭・呼吸が楽で声がこもらない】

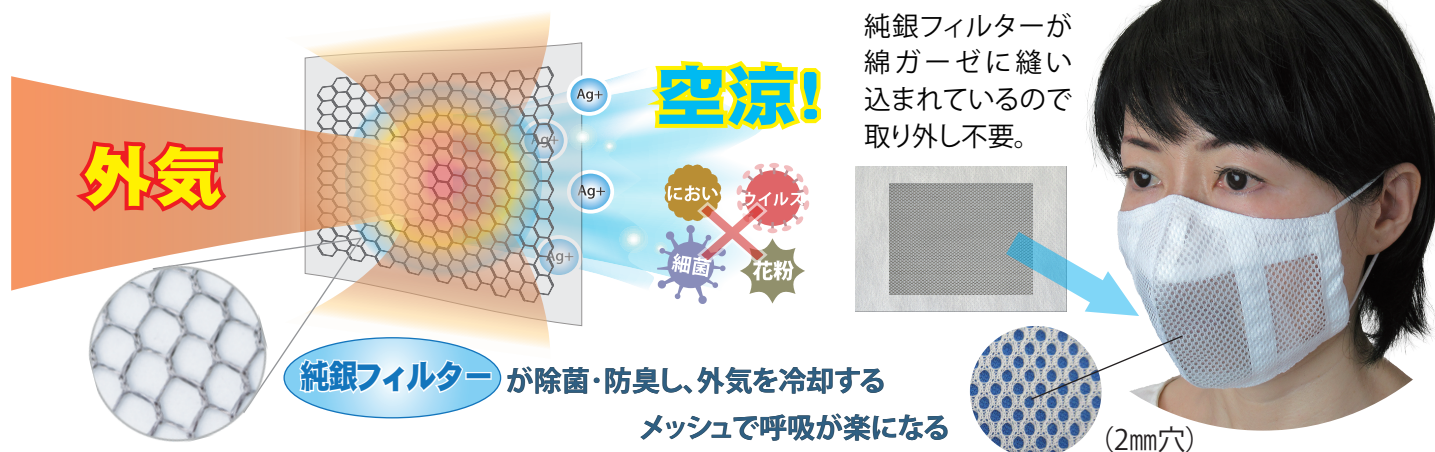

【3つの空涼効果で快適】

- 1 銀は最も熱伝導率の高い金属のため、外気の熱が純銀フィルターを通過すると放熱され、吸入時に温度が下がる。
- 2 マスク本体は2mm穴のメッシュ素材で、通気性がよくマスク内に熱がこもりにくい。声がこもらず会話が楽になる。
- 3 マスクの両サイドに排気用の窓を開けており、息を吐く時に窓から空気がぬけるので運動の際、呼吸が楽になる。

【マスク性能】

- マスクが蒸れない
- 通気性があり呼吸が楽
- 声がこもらない
- 軽量で耳への負担軽減
- マスクが臭わない
- 除菌でマスクが清潔
- 花粉・PM2.5 を抑制

【マスク用途】


- 施設・飲食・店舗スタッフとして接客中に
- スポーツクラブなどやランニング中に
- テーマパークなどの遊戯施設内で
- カラオケボックスで歌うときに
(マスクをしたままでも楽に歌えます)
- ライブやコンサートなどのイベントで
- 会議や商談中、工場や運送の作業中に、etc

【銀イオンで除菌・消臭・花粉対策 ●安心できる高機能3層構造】

純銀フィルターが銀イオンを発生し、雑菌やウイルス等を除菌し、消臭しますので、マスク内が清潔で**マスクが臭いしません**。花粉やアレル物質も抑制するので呼吸が楽になります。

- 表地のメッシュは高い放熱・通気性
 - 綿ガーゼは飛沫を防止
 - 純銀フィルターは空涼とマスク内を除菌・消臭
- 3つ合わせても超軽量(8g)で重さを感じません

メッシュ(放熱・通気) 綿ガーゼ(飛沫防止) 純銀フィルター(空涼・除菌・消臭)

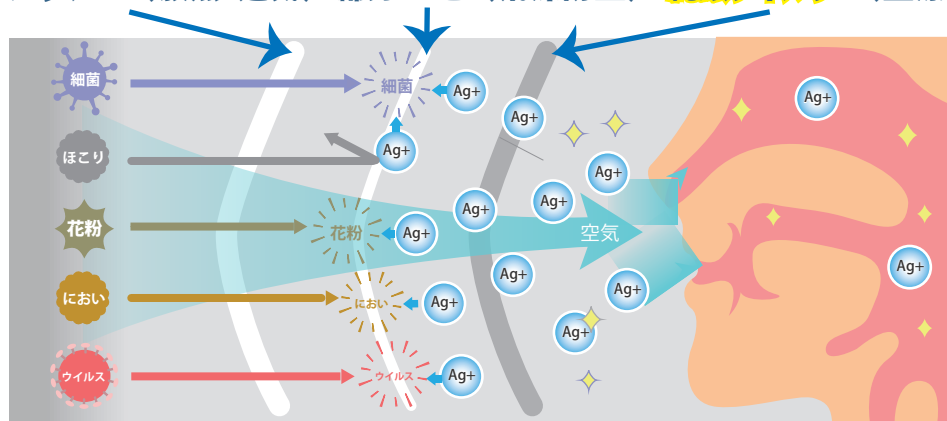

通気性が高いマスクは感染予防には適さない、しかし通気性が悪いと蒸れる、声がこもる、息苦しいなど日常生活に支障があります。

銀イオン空涼マスクは純銀フィルターとメッシュマスクを組み合わせた3層構造で、飛沫防止、除菌・防臭、呼吸が楽にできる構造になっています。

銀イオン空涼マスクのセット内容と仕様

《銀イオン空涼マスクの内容》

マスクの紐を調整

純銀フィルター

マスクのガーゼ
に縫い付け

《銀イオン空涼マスク(白色)の仕様》

＜素材＞

マスク(表地ポリエステル100%、裏地綿100%)
純銀フィルター(重量比 ナイロン70%、純銀30%)

＜サイズ、重量＞

マスク(縦140×横210mm、重量 8g)
純銀フィルター(縦70×横90mm、重量 0.2g)

＜使用期限＞

マスク(繰り返し使用、洗濯機可)

＜原産国＞

日本製(素材・縫製はすべて日本製)

●日本特許取得済

●米国・中国・EU出願中

銀イオン空涼マスクの価格と梱包内容


銀イオン空涼マスク

メーカー希望小売価格 3,000円(税込3,300円)/セット

品番(JANコード)	AGSMMS003 (4560293816123)
個包装	PP_PE_PET(気密袋)入り
内箱(入数/サイズ)	6袋入/幅125×高さ215×奥行80mm
外箱(入数/サイズ)	20内箱入/幅410×高さ260×奥行440mm




【使用方法】

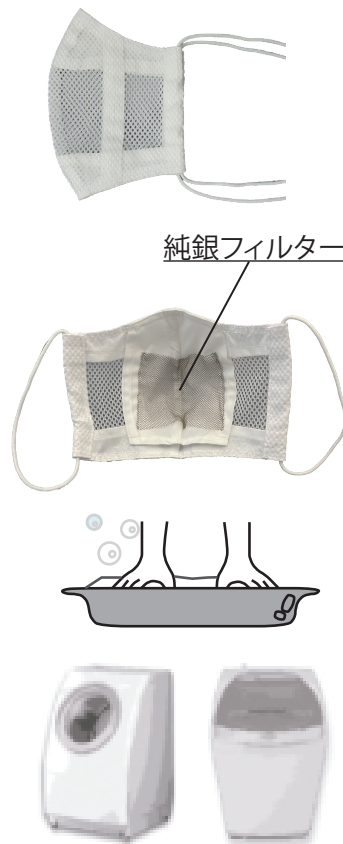

▶マスクのゴムひもの
長さを**ゆるめに調整**
してください。
締めつけすぎると形が
崩れます。

▶使用前に霧吹きで
マスクを湿らせると
より快適です。

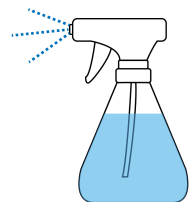

▶洗濯は手洗いでも、洗濯
機でもかまいません。

▶50回以上洗濯しても銀
イオンが発生します。

※2～3回に1回程度洗
濯して下さい。

※銀イオン空涼マスクは
100～150回以上使用可
能です。

●お問い合わせ

製造販売元

M MEDICAL-AID CO.,LTD.
メディカル・エイド株式会社
〒594-1144 大阪府和泉市テクノステージ 3-1-11
medical-aid Tel:0725-53-3270 Fax:0725-53-5337

<http://www.medical-aid.co.jp/>

販売代理店 ●ご購入、お取引に関するお問い合わせ